


倉島九星鍼(梅花鍼) ステンレス

【禁忌・禁止】

妊婦、悪性腫瘍、出血性疾患、金属アレルギーのある患者には適用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に適用すること。

【形状・構造及び原理等】

1.各部名称

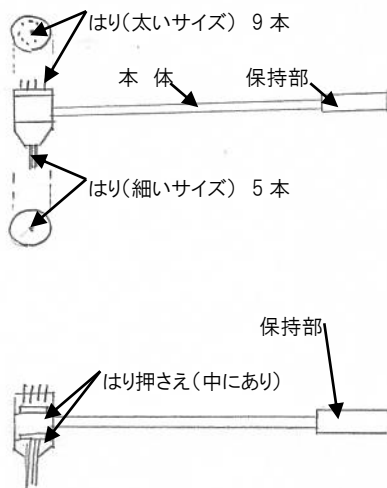

2.原材料

皮膚に接触する部分 : はり…ステンレス

**3.原理

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する再使用可能な非能動型器具をいう。

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

- 1.使用前後はアルコール等で消毒してください。
- 2.皮膚に軽く当てて使用してください。

【使用上の注意】

1 重要な基本的注意

****：本品は医家向け医療機器であるため、当該手技を熟知したはり師、医師、獣医師等有資格者以外の方は使用できません。**

- ・本品は鍼治療用です。鍼治療の目的以外には使用しないでください。
- ・使用に先立ち、製品の破損、変色等の有無を確認し、異常が認められた場合は使用しないでください。
- ・再使用時は、洗浄・消毒をして使用してください。
- ・皮膚が赤くなったら、それ以上の刺激を加えないでください。
- ・目の周囲、耳の中には使用しないでください。
- ・垂直に強く押し付けること、強く擦ることは皮膚を傷つけますのでこのような使用方法はしないでください。
- ・分解しないでください。
- ・処分する場合は医療廃棄物として自治体の指示に従ってください。

2.不具合・有害事象

・重大な有害事象

本品の使用により以下のような有害事象の可能性があります。
出血、アレルギー反応

3.高齢者への適用

・高齢者への適用に当たっては、急激なショック等を与えないよう慎重に刺鍼してください。

4.妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

・妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用に当たっては、急激なショック等を与えないよう慎重に刺鍼してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温・多湿を避けて清潔に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・再使用時は、洗浄・消毒して使用してください。
- ・再使用時は、傷、破損等の異状がないことを確認してください。
- ・製品を一度分解すると性能が保持できなくなりますので分解しないでください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者 株式会社 前田豊吉商店
〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 1-22-15
電話番号 03-3332-7634
製造業者 株式会社 前田豊吉商店