

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 再使用可能な毫鍼 JMDNコード 35207001
三稜鍼(パネ式)

【警告】


- ・本品の操作は当該手技を熟知したはり師、医師が行い、その管理も行うこと。
- ・使用前に必ずはりの出る長さを確認すること。
- ・操作方法によって皮膚に傷が残る場合があります。

【禁忌・禁止】

妊婦、悪性腫瘍、出血性疾患、金属アレルギーのある患者には適用しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に適用すること。

【形状・構造及び原理等】

1.各部名称

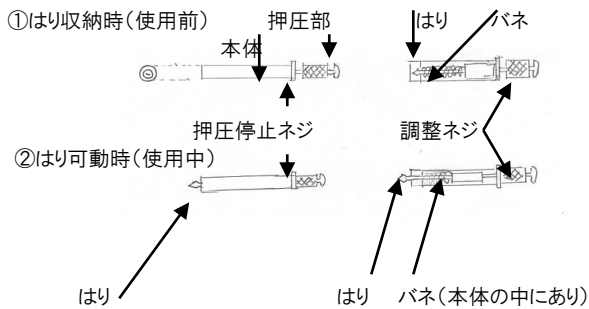

寸法は注文により決定

2.原材料

皮膚に接触する部分：はり・・・ステンレス

*3.原理

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、末梢神経を刺激する細長く先の尖った再使用可能な器具であって、滅菌済みを除いた器具をいう。

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

- 1.使用前後はアルコール等で消毒してください。
- 2.使用前に調整ネジで調整しながら、はりが本体から出る長さを決定してください。
- 3.本体を固定し、押圧部を軽く押し、使用してください。
- 4.独特の手技が必要です。

【使用上の注意】

1 重要な基本的注意

- ・本品は医家向け医療機器であるため、当該手技を熟知したはり師、医師、獣医師等有資格者以外の方は使用できません。
- ・本品は鍼治療用です。鍼治療の目的以外には使用しないでください。
- ・使用に先立ち、製品の破損、変色等の有無を確認し、異常が認められた場合は使用しないでください。
- ・使用前に必ずはりの出る長さを調整・確認してください。
- ・はりは3mmまで出るように調整ネジを設定してご使用できます。3.5mm以上はりが出るように調整しますと構造上まれに先端が引っかかる場合がありますので3.5mm以上はりは出さないでください。
- ・再使用時は、洗浄・消毒をして使用してください。
- ・処分する場合は医療廃棄物として自治体の指示に従ってください。

2 不具合・有害事象

・重大な有害事象

本品の使用により以下のような有害事象の可能性があります。
出血、アレルギー反応

3.高齢者への適用

・高齢者への適用に当たっては、急激なショック等を与えないよう慎重に刺鍼してください。

4.妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

・妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用に当たっては、急激なショック等を与えないよう慎重に刺鍼してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温・多湿を避けて清潔に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・再使用時は、洗浄・消毒して使用してください。
- ・再使用時は、傷、破損等異常がないことを確認してください。
- ・製品を一度分解すると性能が保持できなくなりますので分解しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 前田豊吉商店
〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 1-22-15
電話番号 03-3332-7634
製造業者 株式会社 前田豊吉商店